

嘔吐物処理マニュアル




- ① 箱 (組立式チリ取り兼用箱)
- ② 嘔吐物凝固剤
- ③ ヘラ
- ④ 使い捨て手袋 2 組
- ⑤ ペーパータオル
- ⑥ マスク
- ⑦ 手揚げポリ袋 2 枚
- ⑧ 長袖エプロン
- ⑨ キャップ
- ⑩ 靴カバー
- ⑪ 説明書



作業時の服装

キャップ・マスク
・エプロン・靴カバー
・手袋は二重に、(※透明な手袋を内側にブルーの手袋を外側に装着)

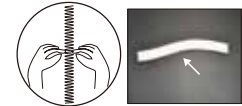

キャップの使用方法

1. 両手でキャップの真ん中をもって
2. 左右に引き端まで広げるとキャップになります
3. キャップの縁端にそって頭にかがり毛髪を中に入れます



除菌剤を準備

除菌剤の希釈

お手持ちの塩素系除菌漂白剤 (次亜塩素酸ナトリウム液 6%) を 6 倍し、1,000ppm の除菌希釈液を作ります

1.5 リットル (1,500ml) ペットボトルにペットボトルのキャップ 5 杯強の原液 (22.5ml) を入れ、水を加えて 1.5 リットル (1,500ml) にする



外箱でチリ取りを組み立てる



嘔吐物は広がらない様、凝固剤を外側から円を描くように中心に向けてまんべんなく振りかけます



静かに除菌剤をかけます



付属のチリ取りとへらを使い外側から中心にかき混ぜ嘔吐物を処理します



処理した嘔吐物およびチリ取り・へら・外側の手袋をごみ袋に入れ、除菌剤をかけて、しっかり封をします



床に除菌剤をかけて浸し、しばらくしてから汚染場所を広げないようペーパータオルで拭き取ります



拭き取った後はきれいに水拭きをします



拭き取ったペーパーと作業時の手袋・マスク・エプロン・靴カバー・キャップを注意して外し、ごみ袋に入れ除菌剤をかけてしっかり封をします



処理後は十分にうがいと手洗いをし、換気をして下さい



手袋の外し方

手袋の外し方



- ① 袖口から3cmの部分をつかむ。
- ② 手袋の中で丸め込む。
- ③ 手袋を外した手で袖口に差し入れる。
- ④ 先に外した手袋を包みながら、手を引き抜く。

使用上の注意

- 本品は上記の用途以外には使用しないで下さい。
- 除菌剤はご使用の都度、希釈して下さい。
- 希釈した除菌剤が残った場合、保存せず廃棄して下さい。
- 処理後、使用したキットはすべて手揚げポリ袋に入れて破棄して下さい。
- ご使用になる除菌剤本体の表示(使い方、使用上の注意、使えないもの)をよく読んでからお使い下さい。
(床がじゅうたん、色ものの場合、脱色する場合があります。)

